

beurer medical

Kurzanleitung

GL 50 mg/dL
DE



Warn- und Sicherheitshinweise



Vor dem ersten Gebrauch

Lesen Sie vor der ersten Blutzucker-Messung unbedingt die ausführliche Gebrauchsanleitung. Kontrollieren Sie die Messeinheit gemäß Gebrauchsanweisung.

Infektionsgefahr




Das Messgerät und das Zubehör können mit menschlichem Blut in Kontakt kommen und stellen darum eine mögliche Infektionsquelle dar.

- Benutzen Sie Messgerät, Stechhilfe und Zubehör nie gemeinsam mit anderen Personen.
- Beachten Sie bei Verwendung des Messsystems an unterschiedlichen Personen die allgemein gültigen Hygiene-Vorschriften.
- Verwenden Sie bei jeder Blutprobe eine neue sterile Nadel-Lanzette.
- Hände vor der Blutprobe mit warmen Wasser und Seife reinigen und abtrocknen.




Stechhilfe und Gerät vorbereiten

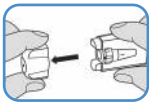

Kappe abziehen

Kappe von der Stechhilfe des Messgerätes abziehen.

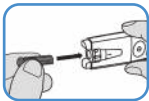

Nadel-Lanzette einlegen


Nadel-Lanzette in die Stechhilfe einlegen. Nadel-Lanzette am Schaft festhalten und Schutzscheibe abdrehen. Schutzscheibe aufbewahren. Kappe wieder vorsichtig auf die Stechhilfe setzen.

Stechhilfe und Gerät vorbereiten




Einstechtiefe wählen

Drehen Sie das Rädchen bis sich der gewünschte Balken in der Mitte an der schwarzen Markierung befindet.

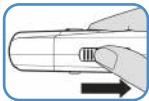

Stechhilfe spannen

Ziehen Sie den Schieber in Richtung des Pfeiles bis zum Anschlag zurück und lassen ihn wieder los. Die Stechhilfe ist nun gespannt.

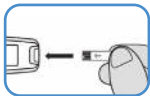


Teststreifen einlegen

Stecken Sie den Teststreifen mit den Kontakten voraus in den Schlitz am hinteren Ende des Messgeräts.

Sobald das Teststreifen-Symbol  und das blinkende Blutstropfen-Symbol  angezeigt werden, ist das Gerät messbereit.

Blutprobe gewinnen

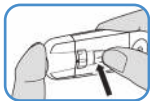


Stechen

Stechhilfe leicht seitlich von der Mitte fest auf der Fingerbeere ansetzen. Auslöseknopf drücken.

Der gewonnene Blutstropfen muss:

- tropfenförmig sein und darf nicht verschmiert werden
- mindestens 1,4 mm groß sein (Originalgröße ●).


Blut auf Teststreifen auftragen

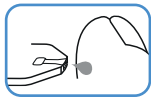

Blutaufnahme-Spalt des Teststreifens an den Blutstropfen halten bis der Spalt vollständig gefüllt ist und das Messgerät im Display beginnt, rückwärts zu zählen. Etwa 5 Sekunden warten bis der gemessene Blutzucker-Wert auf dem Display angezeigt wird.

Normalwert:	2 Stunden nach dem Essen:	70–140 mg/dL
	nüchtern:	70–100 mg/dL

Lanzette entsorgen

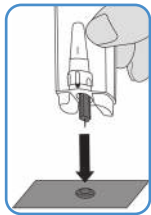

Lanzette entsorgen

Ziehen Sie die Kappe vorsichtig von der Stechhilfe ab. Aufbewahrte Schutzscheibe auf eine Fläche legen und mit der Nadelspitze aufspießen. Ziehen Sie die Nadel-Lanzette vorsichtig aus der Stechhilfe.

Teststreifen und Lanzette ordnungsgemäß entsorgen.
Setzen Sie die Kappe wieder auf das Gerät.

Kritische Messwerte beurteilen

<u>Lo</u>	Unterzucker < 20 mg/dL	Sofortige Behandlung durch einen Arzt notwendig.
<u>65</u>	Niedriger Blutzucker < 70 mg/dL	Zwischenmahlzeit essen. Anweisungen des Arztes befolgen.
<u>150</u>	Hoher Blutzucker nüchtern > 100 mg/dL 2 Std. nach dem Essen > 140 mg/dL	Arzt aufsuchen.

Kritische Messwerte beurteilen

<u>300</u>	Hoher Blutzucker, ggf. Ketone >240 mg/dL	Ketontest empfohlen. Dazu Arzt befragen.
H ,	Sehr hoher Blutzucker >630 mg/dL	Mit neuem Teststreifen messen. Bei gleicher Anzeige sofort Arzt aufsuchen.

Meldungen auf dem Display

LP	Leere Batterien.	Alle Batterien ersetzen.
Ht bzw. Lt	Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs.	Test mit neuem Streifen wiederholen bei Raumtemperatur +20 °C bis +26 °C.
Err 	Gebrauchter oder verunreinigter Teststreifen.	Neuen, nicht verfallenen Streifen einlegen und Messung wiederholen.
Err001/005	Systemfehler.	Batterien entfernen. Batterien wieder einlegen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Kundenservice.
Err002	Teststreifen nicht ausreichend gefüllt.	Wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Teststreifen.



GL 50

Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



Lancet needles / Lanzetten / lancettes / lancetas / lancette:
SteriLance Medical (Suzhou) Inc., No.168 PuTuoShan Road
New District, 215153 Suzhou, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Emergo Europe B.V., Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands

