

## Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten!)

| Bezeichnung            | Füllmenge  | Art.-Nr.  | Gewicht | max. Körpergewicht |
|------------------------|------------|-----------|---------|--------------------|
| Malta Dusch-/Badestuhl | 6-15 Liter | 367.54.30 | 19,3 kg | 130 kg             |

## Zubehör

| Artikel-Nr. | Benennung                       | Farbe   |
|-------------|---------------------------------|---------|
| 467.54.00   | Sitzwanne-Malta                 | blau    |
| 440.10.59   | PUR-Rückenpolster               | schwarz |
| 440.10.62   | PUR-Duschsitzauflage            | schwarz |
| 440.10.04   | PUR-Duschsitz mit Pflegeöffnung | schwarz |

## Maße

| Stuhl                  | Maße ca. | Wanne        | Maße ca.   |
|------------------------|----------|--------------|------------|
| Höhe                   | 104 cm   | Wannenhöhe   | 17 cm      |
| Breite                 | 74 cm    | Wannenbreite | 56 cm      |
| Tiefe                  | 90 cm    | Wannentiefe  | 42,5 cm    |
| Sitzbreite             | 64 cm    | Füllmenge    | 6-15 Liter |
| Sitzhöhe               | 48 cm    |              |            |
| Sitztiefe              | 48 cm    |              |            |
| Fußauflagenverstellbar | 7fach    |              |            |
| Radhöhe                | 12,5 cm  |              |            |

## Hinweis !

### Betriebsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.

Die identische Seriennummer in der BA ist auch auf dem Typenschild des Produktes aufgedruckt. Bei Beanstandungen oder Rückfragen geben Sie bitte Typ, Serien-Nr. und BA-Nr. an.

## Garantie

Auf unsere Produkte geben wir eine Garantie von **2 Jahren**. Voraussetzung für die Garantie sind der bestimmungsgemäße Gebrauch des Produktes, sowie die regelmäßige Durchführung von Wartungen. Ausgeschlossen sind ebenfalls alle Verschleißteile.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, unsachgemäße Wartung, eigenmächtig durchgeführte Änderungen am Produkt, ohne die Genehmigung des Herstellers, führen zum Verlust der Garantie und der Produkthaftung (siehe Wartung).

**Das Auslieferdatum auf dem REBOTEC-Lieferschein gilt als Garantiebeginn.**

## Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz bestimmt. Der Wiedereinsatz (Lebensdauer) ist abhängig vom Produktzustand. Vor dem Wiedereinsatz ist bei dem Produkt eine Wartung durchzuführen und die entsprechenden Anweisungen zu Sicherheit, Pflege und Wartung sind zu beachten und einzuhalten. Diese Überprüfung soll eine unsachgemäße Benutzung durch mögliche oder direkt erkennbare Schäden ausschließen. Wir verweisen hier auf das Medizinproduktegesetz (MPG) und die Betreiberverordnung (MPBetreibV).

## Lebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Produkte beträgt bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, Einhaltung der Sicherheitshinweise, Wartungsintervalle und Pflegehinweise **5 Jahre**. Über diesen Zeitraum hinaus kann das Produkt nur in einem sicheren Produktzustand weiter verwendet werden. Eine Wartung sollte dann mindestens jedes halbe Jahr erfolgen. Besondere Anforderungen an das Produkt, bedingt durch die Nutzung des Patienten, können kürzere Wartungsintervalle hervorrufen.



DE



**REBOTEC®** Rehabilitationsmittel GmbH  
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59  
Telefon: 05431/9416-0  
Telefax : 05431/9416-66  
<http://www.rebotec.de>  
E-Mail: info@rebotec.de



BA-Nr.: 01.07.047/2016-12

# Bedienungsanleitung Dusch- und Badestuhl

Serien-Nr. /Produkt

„Malta“  
Art.-Nr.: 367.54.30/130 kg



## Wichtige Hinweise !

- Bedienungsanleitung **vor dem Erstgebrauch lesen** und für den Benutzer bereithalten.
- Beachten Sie alle Hinweise, besonders die Sicherheitshinweise, und handeln Sie danach.
- Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren u. bei Weiterverkauf beifügen.

## Zweckbestimmung

Der Dusch- und Badestuhl findet seine Anwendung im häuslichen und stationären Bereich. Er dient zur Durchführung von Sitzbädern und Reinigung im Unterleibs-bereich. Trotz optimalen Sitzkomforts ist der Stuhl für längeres Sitzen nicht geeignet. Der Dusch- und Badestuhl ist kurzzeitig im Nassbereich verwendbar.

**Aus Sicherheitsgründen und zur Vorbeugung von Unfällen sollte der Stuhl deshalb mindestens in einem jährlichen Abstand von Ihrem örtlichen Fachhändler, Sanitätshaus oder Wartungsservice überprüft werden!**

## Pflege und Wartung (Wartungsbuch anfordern BA-Nr.: D-01.10.071)

Zur Pflege verwenden Sie ein mildes handelsübliches Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Nach dem Reinigen wischen Sie mit klarem Wasser nach und reiben den Stuhl mit einem Tuch trocken.

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel (Produkthinweise beachten!) mit aggressiven Lösungszusätzen (Säuren, Benzin, Verdüner), sowie harte Reinigungsgegenstände (Bürsten), da sonst die Kunststoffoberfläche beschädigt wird oder sich Ablagerungen an Kunststoffteilen und anderen Materialien bilden können. Beim Einsatz des Produktes im Klinikbereich ist zusätzlich zur allgemeinen Reinigung, in regelmäßigen Abständen der Stuhl bei ca. 85 Grad für 3 Minuten im Reinigungsautomaten zu reinigen. Entfernen Sie vorher eventuelle lose Zubehörteile.

**Die Ursache von Unfällen kann sein, nicht rechtzeitig erkannter Verschleiß oder durch unsachgemäße Behandlung verursachte Schäden.**



## Sicherheitshinweise

- Stuhl darf beim Sitzen/Fahren nur mit eingerasteten Armlehnen verwenden.
- Der Stuhl darf nur am Schiebegriff (Rückenlehne) geschoben werden.
- Die Fußstützen sind vor dem Hinsetzen/Aufstehen abzuschwenken bzw. hochzuklappen. Stellen Sie nicht auf die Fußstützen.
- Stuhl nicht gegen Türschwellen, Kanten oder andere Unebenheiten fahren.
- Stuhl nur im Innenbereich und auf flachen, rutschfesten Untergrund verwenden.
- Mit dem Stuhl nur im gemäßigtem Schrittempo fahren (mit und ohne Patient).
- Nicht aus dem Stuhl hinauslehnen (im Stand und beim Fahren). Bei ungünstiger Stellung der Lenkrollen (nach innenweisend) wird die Standfähigkeit eingeschränkt.
- Tragen bzw. Heben Sie den Stuhl **niemals** mit einem Patienten.
- Der Stuhl ist nur für den Transport von Personen geeignet. **Beachten sie das zulässige max. Körpergewicht (Angabe auf dem Typenschild)!**
- Arretieren sie stets vor der Benutzung des Stuhles die Radfeststeller/Bremse der Hinterräder, um ein Wegrollen des Stuhles zu verhindern.
- Das Hinsetzen, Aufstehen und Umsetzen eines Patienten sollte unter Aufsicht bzw. je nach Gesundheitszustand des Patienten, muss mit Hilfe einer geschulten Pflegeperson erfolgen.
- Die Benutzung des Stuhles von Patienten, die zu unkontrollierten Handlungen oder Bewegungen neigen, darf nicht ohne Aufsicht erfolgen.

## Montageanweisung

Das Produkt wird **nicht** komplett montiert in der Verpackung angeliefert. Vor der Inbetriebnahme sind folgende Montagevorgänge durchzuführen:

1. Schwenken Sie die Armlehne nach hinten, stecken die Rückenlehne auf die Edelstahlrohre des Stuhlkörpers und schieben diese bis zum Anschlag auf das Untergestell.
2. Schwenken Sie die Armlehnen wieder so weit nach vorne, dass diese in den Nuten der Rückenlehne, als auch mit dem Rastbolzen in das Untergestell einrasten.
3. Drehen Sie die Fußstützen so weit nach vorne, bis diese selbstständig einrasten.
4. Klappen Sie die Fußauflagen nach unten. Evtl. die Fußauflagenhöhe einstellen.

## Inbetriebnahme

### Abschwenken der Armlehne

Durch Herausziehen des Rastbolzen wird die Arretierung gelöst und die Armlehne lässt sich nach hinten abschwenken. Beim Hochklappen der Armlehne überprüfen Sie den richtigen Sitz der Arretierung an der Rückenlehne und des Rastbolzens. Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Kontrolle der Verriegelung durch, da durch eventuelle Kalkablagerungen an den Arretierungen die Funktion beeinträchtigt werden kann.

### Anpassen der Fußauflagenhöhe

Die Fußauflage ist stufenweise höhenverstellbar (7-fach). Dazu schrauben sie seitlich die schrauben an der Fußstütze mit einem Inbus-Schlüssel (SW6) heraus. Wählen Sie die entsprechende Höhe aus und schrauben die Fußauflage wieder fest. Achten Sie auf einen festen Sitz der Schrauben.

### Abklappen der Fußstützen

Schwenken Sie zunächst die Fußauflagen nach oben und heben dann die Fußstütze leicht an. Die Fußstütze lässt sich nun seitlich nach hinten abklappen.

### Abnehmen der Fußstützen

Entfernen Sie zuerst die Sitzwanne. Heben Sie die Fußstütze um ca. 10 cm an (bis oberhalb der Querstrebe) und drehen diese um 90 Grad nach außen. Jetzt können Sie die Fußstütze ganz nach oben schieben und herausziehen.

### Abnehmen des Rückenpolsters

Das Rückenpolster ist an der Rückenlehne mit Noppen befestigt. Drücken Sie gegen die Noppen, so löst sich das Rückenpolster und kann abgenommen werden.

### Radfeststeller

Treten Sie den Betätigungshebel (ROT) an den Rädern nach unten. Die Räder sind nun gebremst und richtungsgestellt. Das Lösen der Räder erfolgt durch Anheben des Betätigungshebels.

### Sitzwanne

Zur besseren Handhabung bei der Reinigung kann die Sitzwanne vom Stuhlrahmen abgenommen werden (Sitzwanne vorher entleeren).

Die Sitzwanne ist mit einer Anschlussgarnitur für das Ablassen des Wassers ausgestattet.

