Brava®



Geruchsneutralisierendes Gleitmittel

Stomaversorgung



Gebrauchsanweisung

23325885 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten.© 2021-02-02

Verwendungszweck

Das Brava geruchsneutralisierende Gleitmittel neutralisiert Gerüche und macht den Inhalt eines Stomaversorgung gleitfähig.

Vorsichtsmaßnahmen

Vor Sonnenlicht schützen.

Information

Inhaltsstoffe:

Wasser, Cocamidopropylbetain, Hydroxypropyl Guar, Duftstoff, Tetranatrium-EDTA, Imidiazolidinylharnstoff, Zitronensäure.

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Anwendung



Geben Sie 5 bis 10 ml oder ein Tütchen in den Beutel und reiben Sie den Beutel vorsichtig, um das Brava geruchsneutralisierende Gleitmittel gleichmäßig zu verteilen.

Passen Sie die Menge an die Größe Ihres Stomabeutels an.



Wenn Sie einen Drainagebeutel verwenden, können Sie das geruchsneutralisierende Gleitmittel auch über den Auslass hinzufügen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang nach dem Entleeren des Beutels.

Entsorgung

Das Produkt zusammen mit dem normalen Hausmüll oder gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgen.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorkommnis gekommen ist, melden Sie dieses bitte dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde.

Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte



Katalognummer



Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer / LOT-Nummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Zeigt an, dass ein Barcode eine Unique Device Identification (UDI) enthält



(Global Trade Item Number) Globale Artikelnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Recyclingfähige Verpackung