

Brava®

Elastischer
Fixierstreifen Bogen
Elastischer
Fixierstreifen XL
Elastischer
Fixierstreifen Spitz
Elastischer
Fixierstreifen Gerade



Gebrauchsanweisung

23322563 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten.©
2019-10-25



Bestimmungsgemäße Verwendung

Brava elastischer Fixierstreifen ist dazu bestimmt, den Rand der Stomabasisplatte/des Stomahautschutzes zu stützen, indem er zusätzliche Haftung auf der intakten peristomalen Haut bietet.

Indikationen

Brava elastischer Fixierstreifen ist für Personen indiziert, die einen Stomabeutel mit Basisplatte/Hautschutz verwenden.

Warnhinweise

Eine Wiederverwendung dieses Produkts für den Einmalgebrauch wird aufgrund des Risikos von Kreuzkontamination nicht empfohlen.

Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion, und/oder Sterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und somit ein zusätzliches Risiko einer körperlichen Schädigung oder Infektion des Anwenders darstellen.

Wichtiger Hinweis

Vor direktem Sonnenlicht schützen, da dies die Produktqualität beeinträchtigen kann.

Das Produkt beim Anbringen nicht dehnen, da dies die Produktperformance beeinträchtigen kann.

Informationen

Einwegprodukt.

Die Produkte sind dazu bestimmt, bis zur Entnahme zur Verwendung im Karton aufbewahrt zu werden, da der Karton die Produkte schützt und das Kartonetikett wichtige Informationen wie Chargennummer, Verfallsdatum sowie einen eindeutigen Strichcode enthält.

Das Produkt muss vor einer MRT-Untersuchung nicht abgenommen werden, da es MR-sicher ist.

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Besondere Lagerungsbedingungen

Vor Sonnenlicht schützen.

Lagern Sie das Produkt in horizontaler Position.

Anwendungshinweise


Die Verpackung öffnen

Halten Sie die türkise Lasche fest und ziehen Sie sie zurück. Reißen Sie die Lasche nicht ab, da die Verpackung damit wieder verschlossen werden kann.

Anwendung

Elastischer Fixierstreifen Bogen


Elastischer Fixierstreifen XL

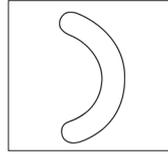


Entfernen Sie eine der Schutzpapierfolien, bevor Sie den Elastischen Fixierstreifen anbringen.

Platzieren Sie den Fixierstreifen nach Bedarf dort auf die Basisplatte/den Hautschutz, wo Sie Unterstützung benötigen. Achten Sie darauf, dass der Fixierstreifen einen Teil des Hautschutzes bedeckt.

Das Produkt beim Anbringen nicht dehnen.

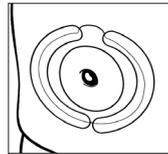


Ziehen Sie die zweite Schutzpapierfolie ab und streichen Sie den Elastischen Fixierstreifen auf der Haut glatt. Gegebenenfalls wiederholen.

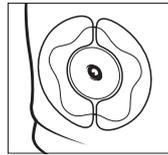

Der elastische Fixierstreifen XL kann auch mit der SenSura® Mio Concave Basisplatte verwendet werden.

Anwendung


Elastischer Fixierstreifen Spitz

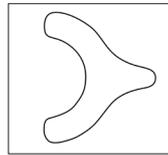

Entfernen Sie eine der Schutzpapierfolien, bevor Sie den Elastischen Fixierstreifen anbringen.

Platzieren Sie den Fixierstreifen nach Bedarf dort auf die Basisplatte/den Hautschutz, wo Sie die zusätzliche Unterstützung benötigen. Achten Sie darauf, dass der Fixierstreifen einen Teil des Hautschutzes bedeckt.


Das Produkt beim Anbringen nicht dehnen.

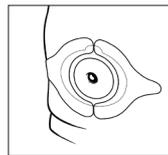

Ziehen Sie die zweite Schutzpapierfolie ab und streichen Sie den Elastischen Fixierstreifen auf der Haut glatt. Gegebenenfalls wiederholen.

Anwendung


Elastischer Fixierstreifen Gerade

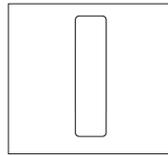

Entfernen Sie eine der Schutzpapierfolien, bevor Sie den Elastischen Fixierstreifen anbringen.

Platzieren Sie den Fixierstreifen nach Bedarf dort auf die quadratische Basisplatte/den quadratischen Hautschutz, wo Sie Unterstützung benötigen. Achten Sie darauf, dass der Fixierstreifen einen Teil des Hautschutzes bedeckt.

Das Produkt beim Anbringen nicht dehnen.

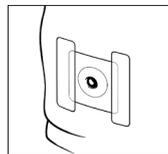

Ziehen Sie die zweite Schutzpapierfolie ab und streichen Sie den Elastischen Fixierstreifen auf der Haut glatt. Gegebenenfalls wiederholen.

Sie können den Fixierstreifen an jeder Stelle anbringen, an der Sie bessere Unterstützung des Hautschutzes bzw. der Basisplatte wünschen.

Entfernung des Fixierstreifens

Der Fixierstreifen kann zusammen mit dem Hautschutz abgelöst werden.
Bei Bedarf die Ränder des Fixierstreifens lösen und den Fixierstreifen zur Entfernung sanft dehnen.

Entsorgung

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Meldung von Vorfällen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde in Ihrem Land.

Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte.



Katalognummer



Haltbarkeitsdatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Nur für den einmaligen Gebrauch



Global Trade Item Number



Vor Sonnenlicht schützen



Hier oben



Recyclingfähige Verpackung