



DE



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telefon: 05431/9416-0
Telefax: 05431/9416-66
Web: www.rebotec.de
E-Mail: info@rebotec.de



BA-Nr.: 01.07.135/2021-07-A01

Bedienungsanleitung

Multifunktions-Pflegerollstuhl

	Phoenix-PU Sitz mit Hygieneausschnitt	Phoenix-PS Sitz geschlossen
REF	350.XX.10	350.XX.40
	150 kg	150 kg

XX = Farbcode



Abbildung ähnlich



Bedienungsanleitung **vor Erstgebrauch lesen** und für den Benutzer weiterhin bereithalten, sowie für spätere Verwendung aufbewahren und bei Weiterverkauf beifügen.




Inhaltsverzeichnis

Multifunktions-Pflegerollstuhl	1	11.6 Benutzug Toiletteneimer mit Deckel ..	9
1. Artikelbeschreibung.....	3	12 Beseitigung von Störungen.....	10
1.1. Einleitung	3	13 Pflege und Wartung.....	10
2. Leistungsmerkmale.....	3	13.1 Pflege.....	10
2.1. Zweckbestimmung	3	13.2 Wartung	10
2.2. Einsatz.....	4	14 Ersatzteile & Zubehör.....	11
2.3. Lagerung & Transport.....	4	15 Skizze & Abmessungen	12
2.4. Ausstattung und Funktionen	4		
2.5. Verpackung.....	4		
2.6. Entsorgung	4		
3. Symbole & Typenschilder.....	4		
4. Sicherheitshinweise	4		
5. Meldung von Vorfällen	5		
6. Garantie.....	6		
6.1. Reklamation	6		
7. Wiedereinsatz, Lebensdauer	6		
8. Lieferumfang.....	6		
9. Gebrauchszustand herstellen	6		
9.1. Umklappen der Fußstützen	6		
9.2. Anpassen Fußauflagenhöhe	6		
9.3. Bedienung der Feststellbremse.....	6		
9.4. Einstellung Kopfstütze	7		
9.5. Einstellung der Höhe und Tiefe	7		
9.6. Einstellung der Neigungsverstellung....	7		
9.7. Einstellung der Kopfstützenneigung	8		
10 Produktdaten	8		
11 Bedienung des Artikels.....	8		
11.1 Hinsetzen	8		
11.2 Abschwenken der Armlehnen.....	9		
11.3 Umklappen der Fußstützen	9		
11.4 Abnehmen der Fußstützen	9		
11.5 Abnehmen der Sitzauflagen.....	9		

1. Artikelbeschreibung

Phoenix PU

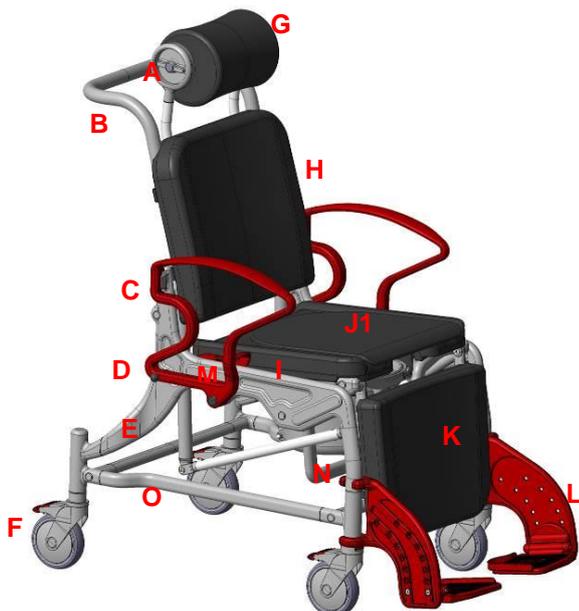

Phoenix PS

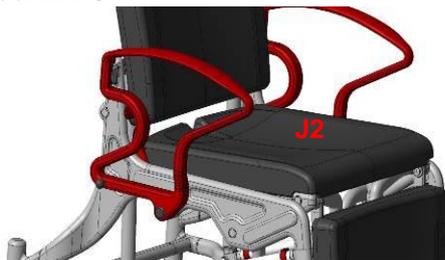


Abbildung zeigt:

A	Drehverstellung für PUR-Kopfstütze
B	Rückenlehne
C	Armlehne (umklappbar)
D	Rastbolzen
E	Stuhlrahmen mit Neigungsverstellung
F	Radeinsatz mit Feststellbremse
G	PUR-Kopfstütze (auswechselbar)
H	PUR-Rückenpolster (abnehmbar)
I	PUR-Sitz, Pflegeöffnung u. Eimeraufnahme
J1	PUR-Sitzpolster (abnehmbar)
J2	PUR-Transportsitz (abnehmbar)
K	PUR-Beinauflage (abnehmbar)
L	Fußstütze mit Fußauflage (verstellbar)
M	Feststellhebel für Neigungsverstellung
N	Toiletteneimer mit Deckel
O	Typenschild

1.1. Einleitung

- Bei dem hier beschriebenen Artikel handelt sich, gemäß **(EU) 2017/745 MDR**, um ein Medizinprodukt der Risikoklasse I.
- In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen und Hinweise zur Inbetriebnahme, Benutzung, Wartung und Pflege des Artikels.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Artikel benutzen. Beachten Sie, die Sicherheitshinweise, und handeln Sie danach.

2. Leistungsmerkmale

2.1. Zweckbestimmung

Phoenix PU

- Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das Duschen im Sitzen und Liegen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Er kann zwischen Sitz- und Liegeposition stufenlos verstellt werden. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert.

Phoenix PS

- Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das Duschen im Sitzen und Liegen. Er kann zwischen Sitz- und Liegeposition stufenlos verstellt werden. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert.

Spezifikation:

- Maximales Nutzergewicht: 150kg
- Höhenverstellbare Fußrasten
- Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar
- Einsatz im Innenbereich

Indikation

- Medizinischer Zustand des Patienten:
- Die Benutzung eines Stuhles von Patienten mit kognitiven Störungen (verringerte Fähigkeiten hinsichtlich geistig, physisch, sensorisch oder mental) ist vorab durch ärztlichen Entscheid (Verschreibung des Produktes) bzw. vor Ort von der Pflegekraft zu entscheiden.

2.2. Einsatz

- Temperaturbereich: 5°C bis 35°C Eine direkte Strahlungswärme auf den Artikel ist zu vermeiden.
- Luftfeuchtigkeit: 40% bis 75%. Außerhalb dieser Bedingungen ist der Artikel nur kurzzeitig einsetzbar.
- Schwere Gegenstände dürfen mit dem Artikel nicht transportiert werden.
- Es muss eine ebene Stellfläche in ausreichender Größe vorhanden sein. Siehe 15.

2.3. Lagerung & Transport

- Temperaturbereich: 5° C bis 25° C. Eine direkte Strahlungswärme auf den Artikel ist zu vermeiden.
- Den Artikel in trockenen Räumen bei einer Luftfeuchtigkeit bis 65% lagern.
- Die Dusche sollte so gestaltet sein, dass eine ebene Stellfläche in ausreichender Größe vorhanden ist.

2.4. Ausstattung und Funktionen

- Die Stühle bestehen aus einem Kunststoffrahmen auf 4x5“ Lenkrollen mit Feststellbremse. Die Armlehnen sind schwenkbar und haben eine Armlehnen Verriegelung.
- Die Fußstützen sind höhenverstellbar und lassen sich abnehmen bzw. umklappen. Die Kopfstütze ist höhenverstellbar und drehbar. Eine Neigungsverstellung des Stuhls, über eine Hebefunktion, für die Rückenlage des Patienten
- Je nach Ausstattungsvariante ist ein PUR-Sitz für Transportzwecke oder ein PUR-Sitz mit Hygieneausschnitt (incl. Toiletteneimer mit Deckel).
- Durch die Bauweise und Verwendungszweck des Produktes ist eine Demontage für den Transport oder Lagerung nicht vorgesehen und erforderlich.

2.5. Verpackung

- Wir empfehlen Ihnen die Umverpackung, für spätere Transportzwecke aufzubewahren.
- Abmessungen: 1005mm x 670mm x 900mm

2.6. Entsorgung

- Die Entsorgung und Recycling benutzter Produkte und Verpackungen müssen gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen. Erkundigen Sie sich bei einem Entsorgungsunternehmen.
- Das Infektionsschutzgesetz ist zu beachten.
- Beachten Sie die Kennzeichnungen auf den Verpackungsmaterialien und handeln Sie danach.

3. Symbole & Typenschilder

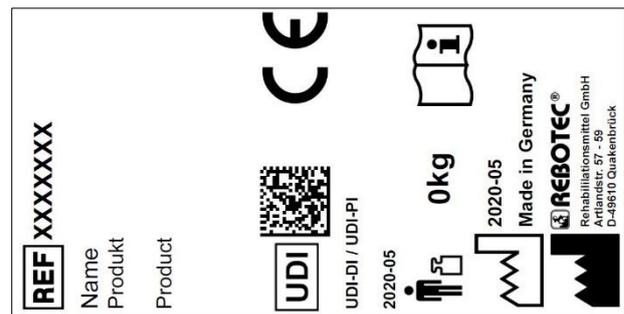


Abbildung ähnlich.

- Das Typenschild darf nicht entfernt werden!
- Zur Ersatzteilbestellung und Reklamationsbearbeitung werden Produktname, Seriennummer und Baujahr benötigt.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Anleitung lesen!		Baujahr Produkt
SN	Seriennummer		Wichtige Information!
REF	Artikelnummer		Maximales Nutzergewicht in kg
	Pflegehinweis		Wartungshinweis
	Nur im Innenbereich anwendbar.		Hersteller
	Visuelles Signal	DE	Sprache
	Bedienungsanleitung lesen!		Nicht in Hausmüll entsorgen.
CE	Produkt entspricht (EU) 2017/745 MDR		
	Vorsicht! Sicherheitshinweise beachten		
UDI	Unique Device Identifier (Daten: GTIN / LOT (SN) / Baujahr)		
MD	Medical Device-Kennzeichen Bei dem Artikel handelt es sich um ein Medizinprodukt.		

4. Sicherheitshinweise



Folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Vor der Erstinbetriebnahme ist die Bedienungsanleitung vollständig zu lesen, um

Schäden durch Fehlbedienung oder Gefährdungen zu vermeiden.

- Vor jeder Inbetriebnahme überprüfen Sie, ob am Artikel erkennbare Schäden vorhanden sind.
- Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen jeglicher Art darf der Artikel nicht verwendet werden.

Vorsicht Sturzgefahr!

- Das Hinsetzen, Aufstehen, Umsetzen und Hinlegen (bei Neigungsverstellung des Stuhls) eines Patienten sollte, je nach Gesundheitszustand des Patienten, mithilfe einer geschulten Pflegeperson erfolgen
- Vor und beim Abkippen des Patienten im Stuhl sollte sich dieser an den Armlehnen festhalten.
- Die Benutzung des Stuhles von Patienten, die zu unkontrollierten Handlungen oder Bewegungen neigen, darf nicht ohne Aufsicht erfolgen.
- Das Befahren des Stuhles bei einem Gefälle oder Steigung darf **nur** mithilfe einer Pflegeperson erfolgen. Generell sollte eine Steigung vorwärts und ein Gefälle rückwärts befahren werden.

Vorsicht Abrutschgefahr!

- Kontrollieren Sie vor dem Benutzen, ob die Sitzflächen fest im Sitzrahmen eingeklemmt sind.
- Arretieren Sie stets vor der Benutzung des Stuhles **mindestens** 2 Feststellbremsen der Räder um ein Wegrollen des Stuhles zu verhindern.
- Beim Hinsetzen nicht vorne auf die Sitzkante bzw. auf das Sitzpolster setzen, sondern die ganze Sitzfläche einnehmen.

Vorsicht Kippgefahr!

- Der Stuhl darf beim, Sitzen, Fahren und der Neigungsverstellung nur mit eingerasteten Armlehnen verwendet werden.
- Der Stuhl darf nur am Schiebegriff (Rückenlehne) geschoben werden.
- Die Fußstützen sind vor dem Hinsetzen/ Aufstehen abzuschwenken bzw. hochzuklappen. Nicht auf die Fußstützen stellen!
- Mit dem Stuhl **nicht** gegen Türschwellen, Kanten oder andere Unebenheiten fahren
- Den Stuhl **nur** im Innenbereich und auf flachen, rutschfesten Untergrund verwenden.
- Mit dem Stuhl **nur** im gemäßigten Schrittempo fahren (mit und ohne Patienten)
- Der Personentransport darf nur in aufrechter Sitzposition erfolgen.

- Nicht aus dem Stuhl hinauslehnen (im Stand und beim Fahren). Bei ungünstiger Stellung der Lenkrollen (nach innen weisend) wird die Standfähigkeit eingeschränkt
- Besondere Vorsicht ist beim Fahren des Stuhles im Neigungszustand zu beachten!

Vorsicht Bruchgefahr!

- Der Stuhl ist **nur** für den Verwendungszweck geeignet. Beachten Sie das zulässige max. Körpergewicht (Angabe auf dem Typenschild)!

Vorsicht Klemmgefahr!

- Greifen Sie beim Hoch- und Herunterklappen der Armlehnen nicht in die Gelenkführung, damit keine Körperteile usw. eingeklemmt werden
- Greifen Sie beim Aufdrücken der Sitzplatten nicht zwischen Sitzfläche/Sitzrahmen sowie beim Einstellen der Neigungsverstellung, damit keine Körperteile/Gegenstände eingeklemmt werden
- Achten Sie beim Umklappen der Fußstützen darauf, dass ein Einklemmen von Teilen vermieden wird.
- Achten Sie beim Einstellen der Kopfstützenverstellung, dass keine Körperteile oder Gegenstände eingeklemmt werden.
- Beim Herausziehen und Einschieben des Toileteneimers besteht Klemmgefahr der Weichteile. Zur Vermeidung von Verletzungen darf der Eimer nur herausgezogen oder eingeschoben werden, wenn kein Nutzer im Stuhl sitzt.

Vorsicht Verletzungsgefahr!

- Bei Oberflächentemperaturen > 40°C besteht Verletzungsgefahr. Setzen Sie deshalb den Artikel keiner zu hoher Temperatur aus (z.B. Sonneneinstrahlung, Heizkörper, heißem Wasser). Lassen Sie den Artikel vor der Benutzung abkühlen.



Bei Benutzung des Artikels, durch Anwender mit unempfindlicher Haut (keine Temperaturwahrnehmung oder Hautschäden) ist durch das Pflegepersonal eine Wärmekontrolle (z.B. Berührung mit Handrücken) durchzuführen.

5. Meldung von Vorfällen

- Schwerwiegende Vorfälle in Zusammenhang mit dem Artikel, sind unverzüglich dem Hersteller und dem BfArM zu melden.
 - BfArM: www.bfarm.de/DE

- Nutzen Sie die Meldefunktionen und Formulare.
- Hersteller: pms@rebotec.de

6. Garantie

- Der Artikel hat eine Herstellergarantie von 12 Monaten. Voraussetzung sind die allgemeinen AGBs (www.rebotec.de/agbs), sowie die bestimmungsgemäße Verwendung. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
- Eigenmächtig durchgeführte Änderungen an diesem Artikel, führen zum Erlöschen der Produktkonformität und zum Verlust der Garantie.

6.1. Reklamation

- Bitte nehmen Sie vor einer Rücksendung Kontakt zu uns auf.
- Um Transportschäden zu mindern, verwenden Sie möglichst die Originalverpackung.
- Das Infektionsschutzgesetz ist einzuhalten.
- Stellen Sie sicher, dass von dem Artikel bei Rücksendung keine Infektionsgefahr ausgeht.
- Kennzeichnen Sie den Artikel mit dem beiliegenden Infoblatt zur Unbedenklichkeit.
- Für Rücksendungen, die nicht als unbedenklich gekennzeichnet sind, fallen ggf. Kosten an.

7. Wiedereinsatz, Lebensdauer

- Der Artikel ist für den Wiedereinsatz geeignet. Die Anzahl der Wiedereinsätze ist abhängig von der Nutzungsintensität und Nutzungsweise des Artikels.
- Vor dem Wiedereinsatz ist der Artikel hygienisch aufzubereiten und die technisch, funktionelle Sicherheit des Artikels zu prüfen und ggf. wiederherzustellen. Siehe 13.
- Weitere Informationen sind der Aufbereitungsanleitung (01.121.58) und der Wartungsanleitung (01.111.51) zu entnehmen.
- Die Dokumente können unter folgendem Link heruntergeladen werden.
 - www.rebotec.de/downloads
- Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch beträgt die Produktlebensdauer 3 Jahre. Die effektive Lebensdauer kann, abhängig von der Intensität des Gebrauchs und des Allgemeinzustandes, variieren.

8. Lieferumfang

- 1 Pflegerollstuhl PU bzw. PS
- 1 Kopfstützeinheit Form1
- 1 Bedienungsanleitung (01.07.135)


Aufbereitungs- und Wartungsanleitung können Sie bestellen oder auf www.rebotec.de/downloads ansehen und herunterladen.

9. Gebrauchszustand herstellen

- Der Artikel wurde im Werk auf Fehlerfreiheit und Vollständigkeit geprüft. Bitte prüfen Sie den Artikel nach Erhalt auf eventuelle, während des Transportes aufgetretene Schäden und auf Vollständigkeit des Lieferumfangs. Der Aufbau bzw. die Einstellung erfolgt durch den Fachhändler.

9.1. Umklappen der Fußstützen

- Drehen (1) Sie die Fußstützen so weit nach vorne bis diese selbstständig einrasten. Klappen (2) Sie die Fußauflagen nach unten. Eventuell die Fußauflagenhöhe einstellen.

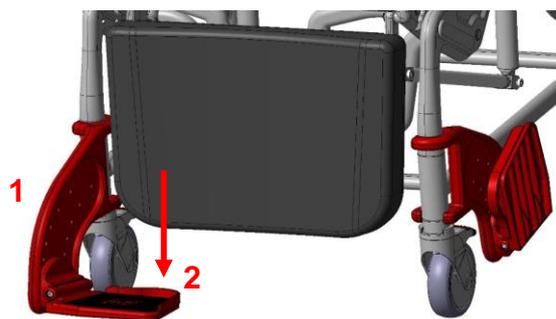


9.2. Anpassen Fußauflagenhöhe



- Die Fußauflage ist 4-fach höhenverstellbar. Schrauben Sie seitlich die Schrauben an der Fußstütze mit einem Innensechskantschlüssel (SW 5) heraus. Wählen Sie die entsprechende Stufe (1-4) aus und schrauben die Fußauflage wieder fest. Achten Sie auf einen festen Sitz der Schrauben!


9.3. Bedienung der Feststellbremse

- Drücken Sie mit dem Fuß die Feststellbremse nach unten. Das Rad ist nun gebremst und richtungsgestellt. Das Lösen des Rades erfolgt durch Anheben des Betätigungshebels mit dem Fuß

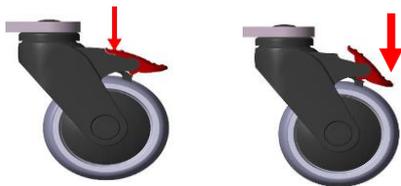


9.4. Einstellung Kopfstütze

- Klappen Sie die Hebel (A) nach oben und stecken die Rohre der Kopfstützeneinheit in die Öffnungen.
- Schieben Sie die Rohre so weit runter bis der Druck-knopf (C) in der Lochung (B) einrastet
- Drücken Sie anschließend den Druckknopf (C) ganz rein und schieben die Rohre bis zum Endanschlag und klappen die Hebel (A) ganz nach unten.

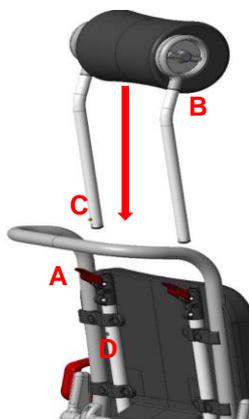

9.5. Einstellung der Höhe und Tiefe


- Zum Verstellen der Kopfstützenhöhe klappen Sie die beiden Hebel (A) nach oben und schieben die Kopfstütze in die entsprechende Höhe
- Die Kopfstütze ist soweit stufenlos einstellbar (ca. 120 mm) bis den Druckknopf (B) in die Lochung (Endstellung) einrastet.
- Nach Einstellung klappen Sie die beiden Hebel (A) wieder ganz nach unten. Durch Entfernen der Clips (C) kann die Kopfstütze zum Reinigen oder Austausch gewechselt werden.

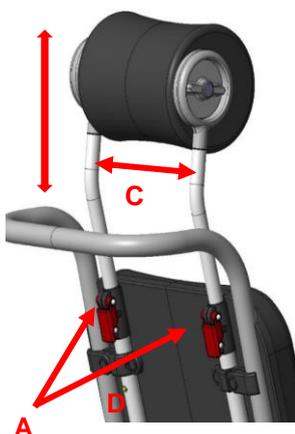



9.6 Einstellung der Neigungsverstellung

- Die Rückenlehne lässt sich stufenlos um ca. 37 Grad nach hinten neigen, hierbei verstellt sich die Sitzfläche um 12 Grad.
- Ziehen Sie den Feststellhebel (A) senkrecht nach oben und drücken anschließend an der Rückenlehne (B) nach unten in die gewünschte Position.
- Drücken Sie den Feststellhebel (C) wieder ganz nach unten.

Sitzstellung

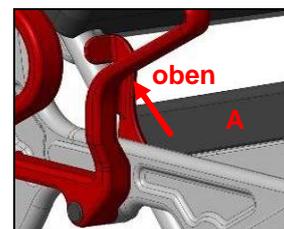


Neigungsstellung

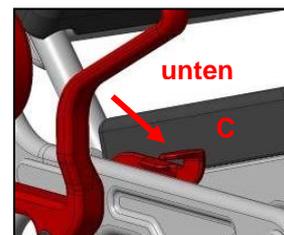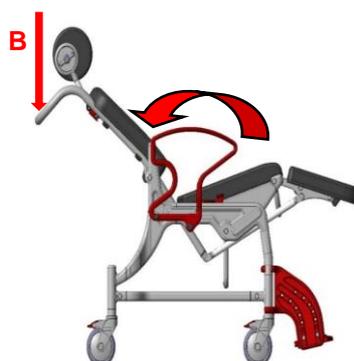

Wartungshinweis

 Ist die Funktion des Feststellhebels zu schwer- bzw. zu leichtgängig kann die Klemmwirkung durch Nacheinstellung reguliert werden

- Demontieren Sie die Abdeckkappe. Mit einem Inbusschlüssel (SW5) wird durch Rechtsdrehung die Klemmwirkung des Hebels erhöht durch Linksdrehung vermindert. Danach drücken Sie die Abdeckkappe wieder fest an und rasten die Armlehne ein.

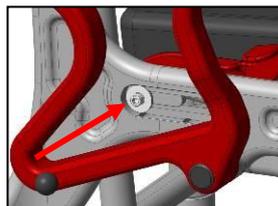


9.7 Einstellung der Kopfstützenneigung

- Durch Drehen des Drehkopfes (A) können Sie die Neigung der Kopfstütze verstellen.



Achtung! Quetschgefahr (B) zwischen Kopfstütze und Rückenpolster.

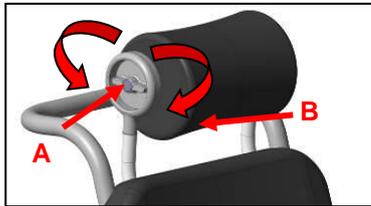

10 Produktdaten

- Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber der in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.
- Siehe 15.

Bereich		Angabe
Phoenix PU		
2.	Produktgewicht*	29,3kg
3.	Gesamtgewicht*	35,3kg
Phoenix PS		
2.	Produktgewicht*	28,4kg
3.	Gesamtgewicht*	34,4kg
Hautverträglichkeit		DIN EN 10993-1/-5
Entzündbarkeit**		DIN EN 1021-1/-2

*Ohne Zubehör.

**Flammhemmend: Bei Artikeln aus PUR-Material.

11 Bedienung des Artikels

- Vor der Benutzung muss sichergestellt sein, dass der Artikel sich in einem ordnungsgemäßen Gebrauchszustand befindet. Sind Mängel oder Fehlfunktionen erkennbar, darf der Artikel nicht verwendet werden. Lassen Sie die Mängel vor dem Einsatz von einem Fachhändler beheben.



Falls erforderlich, je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, muss das Hinsetzen und Aufstehen mithilfe einer Pflegeperson erfolgen. Nachträgliche Einstellungen sind nur durch das Fachpersonal vorzunehmen!

11.1 Hinsetzen

- Vor dem Hinsetzen und Aufstehen ist darauf zu achten, dass ein sicherer Stand des Artikels gegen Wegrutschen und Umkippen gewährleistet ist, mindestens zwei Räder gebremst sind, die Armlehnen richtig eingerastet sind, die Sitzflächen fest

aufliegen, die Fußstützen seitlich weggeklappt bzw. hochgeklappt sind.

1.




- Der Patient muss sich möglichst nahe am Stuhl positionieren. Durch Abstützung an den beiden Armlehnen sollte sich der Patient langsam auf das Polster setzen.

Ist dies bedingt durch seine Einschränkung nicht möglich, muss eine Unterstützung durch das Pflegepersonal erfolgen. Falls notwendig ist der Einsatz einer Aufrichthilfe oder Patientenlifters zweckmäßig



Vorsicht Sturzgefahr!

2.

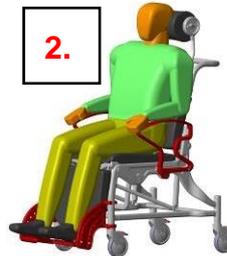


- Ein Hinabfallen auf dem Stuhlsitz ist zu vermeiden. Der Patient soll möglichst ganz auf der Stuhlfläche sitzen und nicht nur auf der Sitzkante.

- Bei einem Personentransport müssen möglichst die gesamte Fläche der Rückenlehne und die Fußstützen benutzt werden

Aufstehen

- Vor dem Aufstehen achten Sie darauf zu achten, dass ein sicherer Stand des Stuhles gegen Wegrutschen und Umkippen gewährleistet ist, **mindestens zwei Räder gebremst** sind, die Armlehnen richtig eingerastet sind, die Fußstützen seitlich weg- bzw. hochgeklappt sind und er Patient aufrecht sitzt.
- Der Patient sollte soweit auf der Stuhlfläche nach vorn rücken, dass die Füße auf dem Boden stehen.

3.

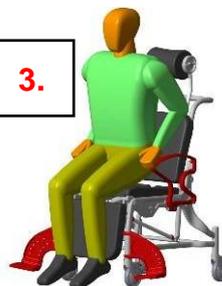

Mit den Armen sich an den Armlehnen abstützen und langsam vom Sitz erheben.

- Den Körper nicht zu weit nach vorne lehnen, damit eine mögliche Sturzgefahr vermieden wird.

- Der Patient sollte sich durch das Pflegepersonal beim Aufstehen helfen lassen.




Vorsicht Sturzgefahr!

4.

- Hinsetzen laut sich beim Setzen oder Aufstehen niemals auf die Fußstützen abstützen.

11.2 Abschwanken der Armlehnen

- Durch Herausziehen der Rastbolzen (A) wird die Arretierung gelöst und die Armlehnen lassen sich nach hinten schwenken.
- Beim Hochklappen der Armlehne überprüfen Sie den richtigen Sitz der Einrastung an der Rückenlehne (B) und des Rastbolzens (A). Das Schwenken der Armlehnen erfolgt per beidhändiger Bedienung.
- Halten Sie hierzu während des gesamten Schwenkvorganges Rastbolzen (A) gezogen und führen die Armlehne mit der anderen Hand an Punkt (C). Berühren Sie hierbei nur den Außenbereich und greifen nicht in die Armlehne hinein oder hindurch.

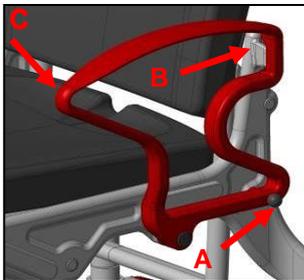

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Kontrolle der Verringerung durch, da durch eventuelle Kalkablagerungen an der Arretierung die Gängigkeit beeinträchtigt werden kann.

11.3 Umklappen der Fußstützen

- Schwenken Sie zunächst die Fußauflagen nach oben und heben dann die Fußstütze aus der Einrastung am Rad. Die Fußstütze lässt sich nun seitlich nach hinten umklappen.



11.4 Abnehmen der Fußstützen

- Heben Sie die Fußstütze um ca. 100 mm an und drehen diese um 90 Grad nach außen. Vordere Abdeckkappe am Seitenrahmen lösen.
- Jetzt können Sie die Fußstütze ganz nach oben schieben und herausziehen. Die Abdeckkappe wieder auf klemmen.

11.5 Abnehmen der Sitzauflagen

- Der Sitz mit (I) und ohne (O) Hygieneausschnitt,



das Fußpolster (K) sowie das Rückenpolster (H) können zu Reinigungszwecken bzw. zum Austausch aus seiner Rasterung am Stuhlrahmen abgenommen werden. (siehe Beschreibung des Produktes: Seite 3)

11.6 Benutzung Toiletteneimer mit Deckel


- Bei der Benutzung des Stuhls mit dem Toiletteneimer ist die Anwendung nur in Sitzstellung und nicht in Liegestellung möglich, da sonst der Toiletteneimer herunterfällt.



Achtung! Vor dem Neigen des Stuhles den Eimer entnehmen!

Handhabung

- Schieben Sie von der Rückseite des Stuhls den Toiletteneimer (A) -Toilettendeckel (B) vorher abnehmen unter den Sitz.
- Zum Herausnehmen heben Sie den Toiletteneimer leicht an und ziehen ihn dann nach hinten heraus.
- Die Armlehnen sind zu verriegeln, um ein Herausfallen des Patienten zu verhindern. Nach dem Entfernen des Toiletteneimers ist auf dem Duschsitz das Sitzpolster (C) wieder aufzulegen.

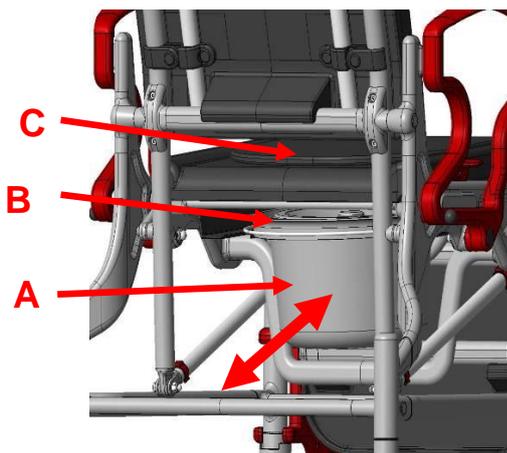

12 Beseitigung von Störungen

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
Armlehne lässt sich nicht abschwanken	Ablagerung in der Arretierung (Rastbolzen)	Reinigung, regelmäßige Kontrolle
Rastbolzen lässt sich nicht herausziehen	Ablagerungen, Zugfeder klemmt bzw. defekt	Reinigung, Rastbolzen erneuern
Fußraste lässt sich nicht umklappen	Ablagerung im Gelenk, Verspannung	Reinigung, Verschraubung prüfen
Radfeststeller bremst nicht	allgemeiner Defekt	siehe Wartung!
Rad dreht sich schwer	Ablagerungen	Reinigung
Rad dreht sich nicht	allgemeiner Defekt	siehe Wartung!
Rad läuft un-rund	starke ungleiche Profilabnutzung	siehe Wartung!
Stuhlrahmen zu instabil	Verschraubung zu lose	Verschraubung: Rahmen, Radeinsätze festziehen
Radeinsatz verbogen	Anfahren gegen ein Hindernis	siehe Wartung!
Hebel für Neigungsverstellung keine Funktion	Klemmt, Bruch, Ablagerung, Verschraubung zu lose oder fest	Kontrolle, Wartung
Neigungsverstellung keine Funktion	Funktionsdefekt	Kontrolle, Wartung
Kopfstützenverstellung keine Funktion	Funktionsdefekt	Kontrolle, Wartung

13 Pflege und Wartung

13.1 Pflege



Verwenden Sie ein mildes handelsübliches Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Nach dem Reinigen wischen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen den Artikel mit einem Tuch.

- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel mit aggressiven Inhaltsstoffen (Säuren, Verdünner), sowie harte Reinigungsgegenstände (Bürsten), da sonst die Oberflächen beschädigt werden oder sich Ablagerungen an den Materialien bilden können.
- Der Artikel ist für die manuelle Reinigung und Desinfektion geeignet. Beachten Sie die Aufbereitungsanleitung (01.12.158).

13.2 Wartung

- Nicht rechtzeitig erkannter Verschleiß und / oder unsachgemäße Behandlung, sowie unregelmäßige bzw. keine Wartung können Unfälle verursachen.



Aus Sicherheitsgründen ist der Artikel **mindestens 1x jährlich fachgerecht zu warten**.

Artikel auf sichtbare Beschädigungen prüfen (Risse, Brüche, lose Teile)

- Standsicherheit vor der Benutzung prüfen

Wartung/Prüfungsumfang

- Eine Wartung sollte folgende Prüfungsarbeiten beinhalten und dokumentiert werden.
- Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz (Besonders der Radeinsätze und des Rahmens)
- Funktion der Armlehnen und Rastbolzen
- Funktion der Fußstütze (Defekte Fußstützen austauschen)
- Laufeigenschaft und Radprofil der Räder (Defekte Räder austauschen)
- Funktion der Feststellbremsen (Defekte Bremsen austauschen)
- Funktion der Kopfstütze
- Funktion der Neigungsverstellung
- Sichtung des Zubehörs auf Mängel

Instandsetzung

- Sollten Sie Fragen zur Wartung des Stuhles haben, wenden Sie sich an einen Fachhändler oder ein Sanitätshaus.
- Bei Beschädigungen und/oder anfallenden Reparaturen unverzüglich den Fachhändler kontaktieren.
- Nehmen Sie **keine** eigenmächtigen Veränderungen oder Umbauten an dem Stuhl vor. Dies beeinträchtigen die Sicherheit und Funktion des Stuhles.

- Bei einer Instandsetzung sind nur Originalersatzteile des Herstellers REBOTEC zu verwenden. Beachten Sie die Hinweise zu Garantie und Gewährleistung.
- Nach einer Wartung oder Instandsetzung führen Sie vor dem Einsatz des Stuhles aus Hygienegründen eine Reinigung durch
- Beachten Sie die Hinweise zur Ersatzteilbestellung, Wiedereinsatz und Lebensdauer.



Für die Dokumentation der Wartung und Instandsetzung bietet REBOTEC ein Wartungsprotokoll an. Bedienungsanleitung und Wartungsprotokoll können Sie bestellen oder über www.rebotec.de ansehen. Dies ermöglicht auch die Informationen auszudrucken und bei Bedarf vorzulesen.

14 Ersatzteile & Zubehör




Nr.	Art.-Nr.	Benennung
1	301.00	Toiletteneimer mit Deckel
2	309.10	Eimeraufnahme
3	440.10.62	PUR-Auflage Toiletten und Duschsitz
4	440.10.14	PUR-Duschsitz
5	440.10.24	PUR-Duschsitz geschlossen
6	450.10.16	PUR Rückenpolster
7	450.10.17	PUR Beinauflage
-	450.10.58	PUR-Kopfstütze-Standard
-	450.10.59	PUR-Kopfstütze-Komfort
-	440.10.32	PUR-Armauflage
-	440.10.40	PUR-Spritzschutz
-	01.07.135	Bedienungsanleitung
-	01.11.151	Wartungsprotokoll



Verwenden Sie ausschließlich REBOTEC-Ersatz- und Zubehörteile, um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten

15 Skizze & Abmessungen

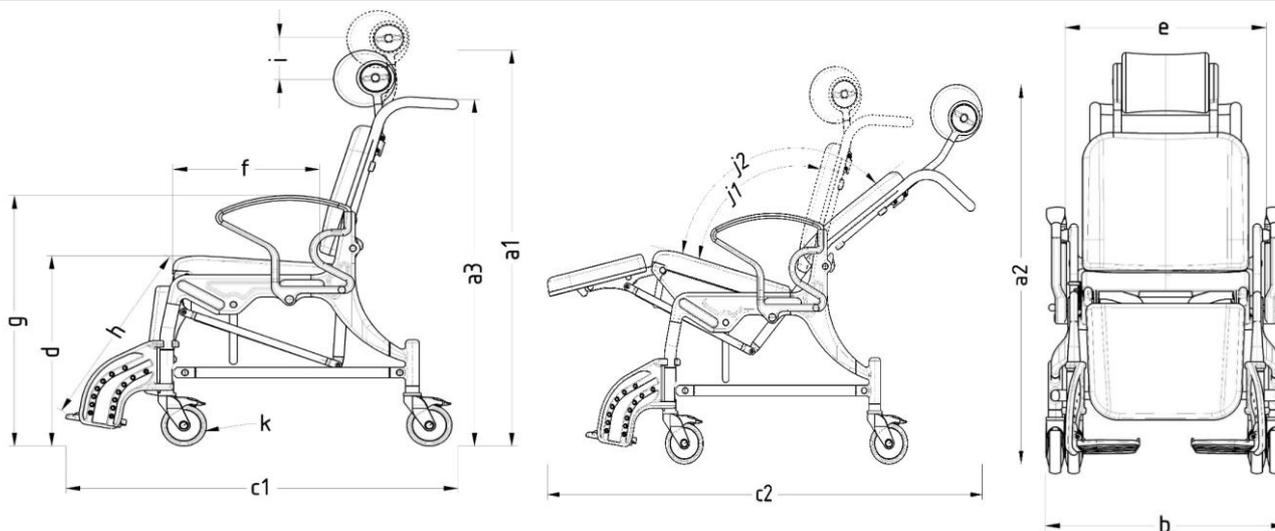

Nr.	Benennung	Typ PU / Maße	Typ PS/ Maße
a1	Gesamthöhe	1200 mm	1200 mm
a2	Gesamthöhe	1160 mm	1160 mm
a3	Griffholmhöhe	1040 mm	1040 mm
b	Gesamtbreite	650 mm	650 mm
c1	Gesamttiefe	1110 mm	1110 mm
c2	Gesamttiefe	1435 mm	1435 mm
d	Sitzhöhe	575 mm	565 mm
	Sitzbreite	450 mm	450 mm
e	Breite zwischen den Armlehnen	540 mm	540 mm
f	Sitztiefe	440 mm	430 mm
g	Höhe bis Armlehnen	760 mm	760 mm
h	Höhe/Knie Fußstütze min.	440 mm	430 mm
	Höhe/Knie Fußstütze max.	520 mm	510 mm
i	Höhe-Kopfstütze	120 mm	120 mm
j1	Sitzwinkel	103°	103°
j2	Liegewinkel	128°	128° mm
k	Vorderraddurchmesser	125 mm	125 mm
	Hinterraddurchmesser	125 mm	125 mm

Maße und Gewicht variieren je nach Ausstattung. Es können geringfügige Abweichungen durch Fertigungstoleranzen auftreten. Änderungen vorbehalten



Bedienungsanleitung vor **Erstgebrauch** lesen und für den Benutzer weiterhin bereithalten, sowie für spätere Verwendung aufbewahren und bei Weiterverkauf beifügen.